

998 0567 PISTOLET PERCE-OREILLE BERGEON ref. 6600

## Mode d'emploi pour l'appareil à percer les oreilles

Choisir le porte bouton correspondant au diamètre des boutons à poser. Visser l'extracteur H sur le porte bouton choisi, et le chasser sur l'appareil. Dévisser l'extracteur H. **Pour enlever le porte-bouton: utiliser l'extracteur H ou faire fonctionner l'appareil à vide dans le creux de la main. Pour boutons BABY** poser l'entretoise (-ENT) sur la partie C en respectant l'orientation (sens de la flèche). Désinfecter les lobes d'oreilles avec le désinfectant No 6140 ou avec un tampon antiseptique No 6427 ou avec de l'alcool à 70° et marquer les endroits à percer avec le stylo médical No 5990-D.

Armer l'appareil en tirant sur le piston A. Sortir l'agrafe stérilisée de son support en plastique en glissant celle-ci dans le logement B de l'appareil, sans toucher l'agrafe avec les doigts. Introduire la tête du bouton dans le porte-bouton C sans le toucher avec les doigts. Tirer l'emballage vers le haut. Placer le lobe de l'oreille dans l'appareil. Viser le point fait précédemment, avec la pointe du bouton. Serrer complètement le lobe contre l'appareil au moyen du levier D. Déclencher l'appareil en appuyant de manière résolue avec le pouce sur le levier E. Dès cet instant l'oreille est percée et l'agrafe et le bouton sont en place. Relâcher le levier D et dégager l'appareil en le déplaçant vers le bas.



